

Hernik



Autokindersitz **HERO** **NXT**

... ist flexibel, bequem und sicher

- 5-Punkt-Gurt mit Schnellverschluss
- rückwärts oder vorwärts nutzbar (360°)
- lange Zeit mitwachsend
- optimale Rumpf-Unterstützung



Autokindersitz HERO **NXT**

...flexibel, bequem und sicher!

Der HERO-NXT Kinderautositz ist ein für den Behindertenbereich modifizierter Autositz der Firma Römer-Britax. Er eignet sich zum Einbau in die meisten handelsüblichen Fahrzeuge, die einen ISOFIX-Anschluss besitzen. Der Autositz ist zur Verwendung auf dem Rücksitz eines PKWs gebaut und muß nicht mit den Kfz-Gurten befestigt werden, was ein leichtes Handling garantiert.

Der HERO-NXT ist mit einem eigenen 5-Punkt-Brust-Schultergurt ausgestattet, der ihr Kind sicher darin fixiert. Mit Hilfe des Schnellverschlusses ist ein bequemer und schneller Transfer möglich.

Das von HERNIK entwickelte Innenpolster sorgt vor allem bei kleinen Kindern für eine optimale Positionierung und kann gegebenenfalls mit einem Abduktionskeil sowie Thoraxpelotten ergänzt werden.

Der HERO-NXT läßt sich sowohl in, als auch gegen die Fahrtrichtung verwenden. Aufgrund der noch schwachen Nackenmuskulatur bei Kindern unter 15 Monaten, sollte der HERO-NXT mit Blick gegen die Fahrtrichtung eingestellt werden. Diese Position ist für Kinder bis 18 kg Körpergewicht möglich. Ab 9 kg kann er jedoch auch mit Blick in Fahrtrichtung genutzt werden.

4

Um Kinder mit eingeschränkter Oberkörperkontrolle zu unterstützen, läßt sich der Sitzwinkel verstellen, wodurch zwischen einer aktiven und einer passiveren Position gewechselt werden kann.



Stütz- und Sicherheitspolster



Das Ein- und Aussteigen verlangt von Eltern, deren Kinder hypoton sind, meist sehr große Anstrengungen. Für einen leichteren Transfer läßt sich der HERO-NXT um 90° schwenken, so dass man das Kind, ohne den Rücken überzustrapazieren, in den Autositz hineinsetzen kann. Das Anschnallen gelingt in dieser Position ebenfalls deutlich einfacher. Anschließend dreht man den HERO-NXT in die gewünschte Position.

Sollte der Autositz in unterschiedlichen Fahrzeugen eingesetzt werden, läßt sich dieser in wenigen Sekunden ein- und ausbauen, da nicht die Gurte des Autos, sondern die ISOFIX-Anschlüsse für einen sicheren Stand sorgen.



- 1** ...in Fahrtrichtung; Rückenhöhe einstellbar
- 2** ...drehbar: in 90°, 180° oder 360°
- 3** ...gegen die Fahrtrichtung
- 4** ...HERO-NXT mit Abduktionskeil und Thoraxpelotten



...vielfältig, wie die Bedürfnisse ihres Kindes

Der für den Reha-Bereich modifizierte Autokindersitz HERO verfügt über anpassbare und individuell positionierbare Thoraxpelotten aus Aluminium, die die seitliche Bewegung des Kindes kontrollieren - so wie die Hände der Mutter es tun würden. Optional ist folgendes Zubehör verfügbar, um einen bequemen und sicheren Transport im Auto zu gewährleisten:

- Abduktionskeil
- Thoraxpelotten
- Aufprall- und Stützpolster

Durch diese Optionen können individuelle Bedürfnisse des einzelnen Kindes berücksichtigt werden, zumal kein Zubehör ein anderes ausschließt. Viele moderne Fahrzeuge sind mit ISOFIX ausgestattet, was beim HERO die Voraussetzung ist, um ihn im Auto zu fixieren. Das Anlegen der Kfz-Gurte entfällt. Eine wichtige Neuerung ist der nun mit einer Bewegung zu straffende 5-Punkt-Gurt, der den Alltag enorm erleichtert.

Da wir den HERO ständig weiterentwickeln, nehmen wir Anregungen und Vorschläge gern entgegen!



Rückenhöhe einstellbar



Abduktionskeil



Thoraxpelotten
aus Aluminium



Ihr Fachgeschäft

HERNIK GmbH
Bodenseestrasse 25
83059 Kolbermoor
☎ +49 (0)8031-2068044
☎ +49 (0)8031-2069215
✉ info@hernik.de
🌐 www.hernik.de