

Gebrauchsanweisung

für die Kopfschutzhelme aus Leder

CAPOFERMO und CAPOFERMO LGT

Wichtiger Hinweis: Lesen sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig, bevor Sie den Kopfschutzhelm benutzen!

Sie haben sich für einen Kopfschutzhelm CAPOFERMO bzw. CAPOFERMO LGT von HERNIK entschieden. Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das sie in unser Produkt setzen. Mit dem Erwerb dieses Kopfschutzhelmes sind sie in den Besitz eines Produktes gelangt, das allen Europäischen Sicherheitsanforderungen entspricht. Sie können sich bei eventuellen Fragen zu unserem Kopfschutzhelm jederzeit an ihr Sanitätshaus wenden. Dort sind ihre Fragen und Anregungen immer willkommen. Obgleich unser Kopfschutzhelm sehr widerstandsfähig ist, sollten sie einige Hinweise beachten. Werden diese berücksichtigt, können sie davon ausgehen noch lange Zeit ein sicheres und zuverlässiges Produkt zu besitzen.

- 1) Achten sie darauf, dass sich der Kopfschutzhelm in tadellosem Zustand befindet, bevor er verwendet wird. Der Kopfschutzhelm sollte sich dem Kopf anschmiegen.
- 2) Stellen Sie den Kopfschutzhelm vor der Benutzung richtig ein. Sollten sie beim Aufsetzen Hilfe benötigen, wenden sie sich doch an einen Helfer, der dieses mit ihnen übt.
- 3) Der Kopfschutzhelm sollte vorzugsweise nur von einem einzigen Benutzer getragen werden. Außerdem sollte er außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- 4) Der Kopfschutzhelm von HERNIK ist mit einem verstellbarem Hals- und Nackenriemen versehen. Befestigen sie beide Riemen so, dass der Kopfschutzhelm gut, aber nicht zu fest sitzt. Dies gilt auch für den separat erhältlichen Kinnschutz. Der Kopfschutzhelm bietet optimalen Schutz, wenn sich dieser an den Kopf anschmiegt und richtig sitzt.
- 5) Der Kopfschutzhelm von HERNIK kann mit milder Seife gereinigt werden. In kräftigen Reinigungsmitteln können Lösungsmittel oder Substanzen enthalten sein, die zu einer Beschädigung des Kopfschutzhelmes oder zu einer Beeinträchtigung der Schutzkraft führen können.
- 6) Setzen sie den Kopfschutzhelm nicht hohen Temperaturen aus.
- 7) Der Kopfschutzhelm darf nicht als Sturzhelm für Moped oder Motorrad verwendet werden. Legen sie den Kopfschutzhelm idealerweise immer an den gleichen Platz in der Nähe des Benutzers, wenn dieser den Kopfschutzhelm zeitweise nicht benötigt.
- 8) Sorgen sie dafür, dass der Kopfschutzhelm im Notfall immer griffbereit ist, so dass dieser schnell und richtig aufgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Kopfschutzhelm nur, wenn sich dieser in einwandfreiem Zustand befindet. Wenden sie sich bei Mängeln immer an ihren Lieferanten (Sanitätshaus).